

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Эндомотор Sunt smil



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Использование.....	4
3. Меры предосторожности.....	4

### 1. Об устройстве

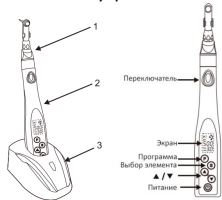

1. Наконечник;
2. Хвост;
3. База.

Нажмите питание чтобы включить/выключить устройство.

#### Переключатель:

Когда питание включено, нажмите «Переключатель», чтобы включить/выключить двигатель.

#### Клавиша выбора элемента S:

Нажмите, чтобы выбрать скорость и крутящий момент.

• Последовательность передачи: Настройка скорости (SP) - клавиша выбора элемента S.

• Настройка крутящего момента (TQ) - клавиша выбора элемента S - Настройка скорости (SP).

• Выбранный элемент будет мигать.

Настройки скорости и крутящего момента можно изменять во время работы машины.

Последовательность передачи (то же самое) (крутящий момент нельзя задать вручную в программах P2 и P4).

#### Программа:

Нажмите, чтобы выбрать 1 из 6 видов рабочих процедур, как показано ниже:

- Положительное автоматическое движение на 360°, вращение вперед плюс реверсивный крутящий момент, затем снимите крутящий момент, чтобы восстановить движение вперед.
- Система обратного возвратно-поступательного движения, назад 150°, вперед 30° (приближение).
- Автоматическое движение назад на 360°, вращение в обратном направлении плюс крутящий момент вперед, затем снимите крутящий момент, чтобы восстановить реверс.
- Система прямого возвратно-поступательного движения, вперед 150°, назад 30° (приближение).
- Поворот на 360°, при возникновении крутящего момента, пожалуйста, остановитесь. Использование ручного напильника для возвратно-поступательного движения Угловой наконечник или напильника с антикравевой напильником для удаления сломанной иглы.




Реверс на 360°, при возникновении крутящего момента остановитесь. Использование напильника с острой кромкой для удаления сломанной иглы.

После завершения настройки клавиш и ожидания, пока экран перестанет мигать, программа будет автоматически сохранена, в это время нажмите клавишу переключения программ P, и заданное значение предыдущей страницы будет автоматически сохранено.

При резке двигайтесь по часовой стрелке.

Используйте  $\nabla/\blacktriangle$  для выбора параметров.

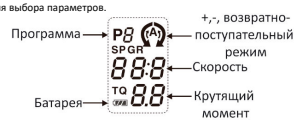

### 2. Использование

При подключении к хосту вставьте установочный штифт наконечника в установочный слот хоста до щелчка. При извлечении выньте его в параллельном и прямом направлении.

Удерживайте кнопку питания, отобразится экран. Затем нажмите выключатель двигателя, начнется вращение, и загорится свет. Наконец, снова нажмите выключатель двигателя, чтобы остановить вращение, и светодиод погаснет через 8 секунд.

Удерживайте выключатель двигателя и не отпускайте его, он продолжит вращаться, и свет загорится, если вы отпустите его, он перестанет вращаться, и светодиод также погаснет через 8 секунд.

После окончания устройство начнет останавливаться при нажатии выключателя двигателя; затем удерживайте кнопку питания, чтобы отключить электрический ток; выньте держатель лампы из наконечника, а затем выньте наконечник из хоста, тем временем закройте крышку двигателя.

Функция автоматического отключения питания:

Источник питания автоматически прекратит работу примерно через 5 минут.

Функция носителя данных. Сохраните данные до выключения, в следующий раз при загрузке он восстановит предыдущие данные.

### 3. Меры предосторожности

- Устройство должно эксплуатироваться исключительно с оригинальными аксессуарами производителя.
- Перед заменой углового наконечника или файла, выключите питание прибора. Случайное касание кнопки Вкл./Выкл. может привести к непреднамеренному вращению.
- Всегда очищайте хвостовую часть файла, который будет использоваться.
- Попадание загрязнений в цангу может привести к потере соосности или резкому ухудшению силы зажима.
- Во время установки аккумулятора обращайте внимание на направление соединителя. Принудительная установка в неправильном направлении может привести к повреждению и вытеканию жидкости, вследствие короткого замыкания.
- Полностью заряженные аккумуляторы, даже при условии, что прибор не эксплуатируется, со временем постепенно разряжаются.
- Рекомендуется зарядить батарею непосредственно перед использованием прибора.
- При повторном включении автоматически отключенного устройства, данные о низком заряде батареи, могут быть отображены не сразу.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Scanned with



Приятного использования!